

## Sondas (SONDES)

### Indicaciones

Les sondes de latex naturel sont el complément idéal pour donner la bouillie aux psittacides depuis le plus jeune âge. Le sondage est la méthode la plus sûre et propre de leur fournir leur bouillie.

Les différents diamètres de sondes permettent de donner la bouillie aux diverses espèces de psittacides à chaque moment de leur développement. Ainsi, par exemple, pour les perroquets gris la sonde de 5 ml est approprié pour donner la bouillie aux poussins âgés jusqu'à 7 jours de vie. La sonde de 10 ml, pour les poussins âgés jusqu'à 14 jours. Celle de 20 ml, jusqu'à 4 semaines de vie. Depuis le premier mois il est conseillé d'utiliser la sonde de 50 ml. En prenant l'exemple des calopsittes, la sonde à utiliser quand les canons des plumes commencent à apparaître, moment auquel on sort les poussins du nid, est celle de 10 ml. Tout de suite il nous faudra celle de 20 ml.

### Recommandations

Il est important de ne pas faire tremper la sonde dans du désinfectant parce que le latex s'abîme. Il est recommandable de nettoyer les tubes avec du détergent et quelques gouttes d'eau de javel, bien rincer et laisser sécher.

### Types de sonde

#### SÉRIE ROUGE (avec la pointe ronde)

seringue de 5 ml (1 unité/sachet)  
 seringue de 10 ml (1 unité/sachet)  
 seringue de 20 ml (1 unité/sachet)  
 seringue de 50 ml (1 unité/sachet)

#### SÉRIE JAUNE

seringue de 5 ml (2 unités/sachet)  
 seringue de 10 ml (2 unités/sachet)  
 seringue de 20 ml (2 unités/sachet)  
 seringue de 50 ml (1 unité/sachet)

